


Mepitac[®]

Secure, gentle fixation with Safetac for fragile or sensitive skin

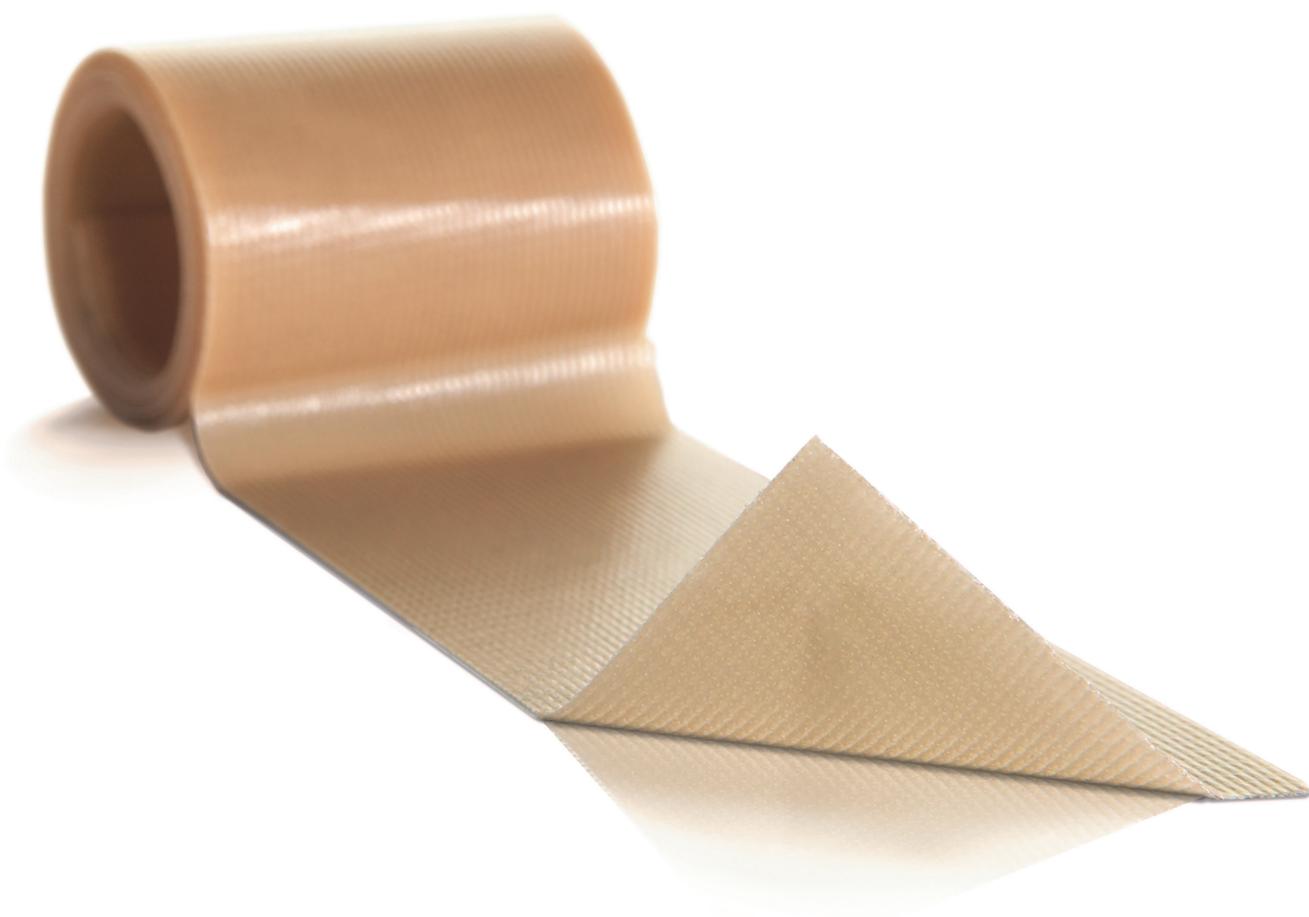

Mepitac[®] メピタック


Mölnlycke[®]



Mepilex® Border Protect
メビレックス® ボーダー プロテクト



Mepilex® Border Post-Op
メビレックス® ボーダー Post Op




Mepiform®
メビフォーム®
Mepitac®
メビタック®

Mepitac® 動きにやさしい傷あとケア用ソフトシリコンテープ

適切な湿潤環境を保つとともに、張力などの物理的的刺激から術後の傷あとを保護します。

通気性に優れており、適切な湿潤環境を保ちます。シャワープルーフ構造になっており、貼付中のシャワー浴が可能です。

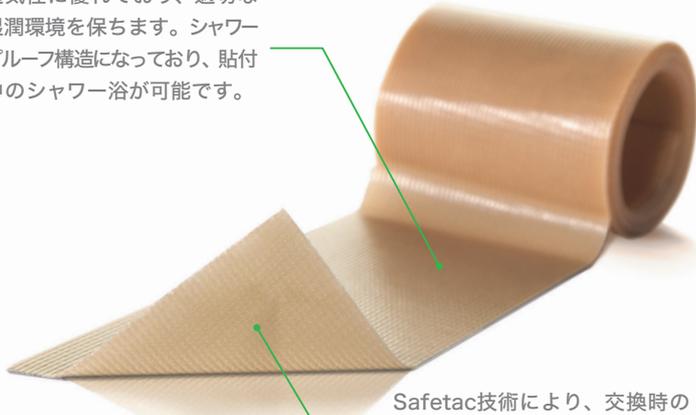

Safetac技術により、交換時の痛みや組織損傷のリスクを低減します。^{2,3} また皮膚の凹凸にフィットし、広い接触面で強固に固定します。¹

Safetac® TECHNOLOGY セーフタック®テクノロジー

セーフタック® テクノロジーはメンリッケヘルスケアが開発したソフトシリコンを使用した粘着技術です。この技術を使用したドレッシング材は、ドレッシング交換時の患者さんの痛みや創床及び創周囲皮膚の組織損傷のリスクを軽減します。

痛みと組織損傷リスクを軽減

従来の粘着剤*

*当技術と粘着剤との比較（自社データによる）



セーフタック®テクノロジー




ドレッシング交換時に、粘着剤接 触部に強い力がかかり、表皮剥離のリスクがあります。ドレッシング交換時の表皮剥離のリスクを軽減します。


使用方法



1 皮膚が清潔で乾燥していることを確認してください。軟膏などを使用している場合は、洗浄してください。はさみでテープを必要な長さに切ってご使用ください。

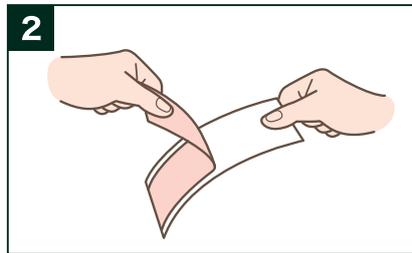

2 剥離フィルムからテープを剥がしてください。

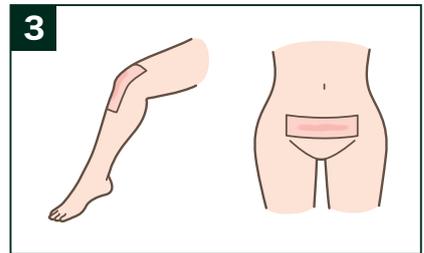

3 余裕をもって傷あと全体をカバーできるよう、伸ばさずに貼ってください。メビタックの粘着力が無くなってきた場合は、使用方法にしたがって、新しいものと交換してください。

- ・本品の使用、創傷部に肥厚性瘢痕、もしくはケロイドの兆候が確認された場合には、使用を中止し、内服薬やステロイド軟膏、ステロイド注射などを含めた適切な治療をおこなってください。
- ・メビタックは防水性があり、入浴やシャワー中にもご使用いただけますが、粘着面に水分が付着すると粘着力が低下しますのでご注意ください。
- ・水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管してください。

References

1. 渡邊真泉, 小川倉ケロイド・肥厚性瘢痕術後の瘢痕ケアにおけるメビタック®の有効性・ケロイド治療ジャーナルNo.6 2012.
2. Wound Union of Wound Healing Societies. Principles of best practice. Minimising pain at wound dressing related procedures. A consensus document. 2004. Published by Medical Educational Partnership London.
3. Principles of best practice: Minimising pain at dressing-related procedures. A consensus document. Toronto, Ontario, Canada: ©WoundPedia Inc 2007

製品番号	サイズ	巻/箱
298300	2x300cm	1
298400	4x150cm	1

Less pain. Less trauma.

メンリッケヘルスケアは、ソフトシリコンを用いた、痛みや組織損傷の少ないドレッシング材を開発し、患者さまの視点からの“アウトカム”向上を提唱しております。



輸入販売元

メンリッケヘルスケア株式会社
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-20-7
コンシェルシア西新宿タワーズ ウェスト
TEL: 03-6914-5004 (代表)

製品に関するお問い合わせ

メンリッケヘルスケア株式会社
 woundケア事業部
 TEL: 03-6279-0991 (直通)



Safetac®, Mepilex®, セーフタック®, メビレックス®はMölnlycke Health Careの登録商標です。