



Mölnlycke®

BARRIER® EasyWarm+®

ご使用前に必ずお読みください。

【製品名】：イージーウォームプラス 【製品番号】：629910 平均温度：44℃ ブランケット内のウォーマー個数：12個 サイズ：150 cm/110cm × 200cm

【原材料】：ウォーミングパッド（活性炭、塩類、鉄粉、水、アクリル酸ナトリウム） 【有効期限】：外枠に記載

【製品について】

自己保温用アクティブブランケット BARRIER EasyWarm+ (イージーウォームプラス) は、自己発熱機能を伴う使い捨てタイプの未滅菌ブランケットです。ブランケットは、真空パックに個別包装されています。真空パックからブランケットを取り出すと、ウォーミングパッドが空気に触れて発熱し始めます。BARRIER EasyWarm+ (イージーウォームプラス) の上部と下部は面ファスナーで簡単に脱着でき、使用者のさまざまな体位に合わせる事ができます。

【製品詳細】

SMS(メルトブローン・スパンボンド)ポリプロピレン不織布を使用した2層構造で、上面にポケットがついています。

生地とポケットはポリエステル糸で縫い合わされ、端部はポリプロピレン不織布を使用しています。ブランケットのポケット内には、鉄粉、活性炭、水、塩、アクリル酸ナトリウムを封入した通気性のあるウォーミングパッドが挿入されています。

【用途】

防寒や身体の保温。冷えの予防。

【以下に該当する場合は使用しないで下さい】

- 18歳未満の方
- 重度の抹消血管疾患、抹消（皮膚を含む）循環に重度の障害がある方（以下、例）
 - ▽重度の低血圧症状がある方、また長期にわたる低血圧症状が危惧される方
 - ▽大動脈手術後における、大動脈クロスクランピング遠位部への使用
 - ▽重度の心不全/心原性ショックの発症が危惧される方

ブランケットは酸素の多い環境では使用しないでください。すなわち、ブランケットは高気圧医療の現場では使用せず、ウォーミングパッドは酸素を使用する治療や器具から流出する酸素に触れないよう使用してください。これらの状況で使用した場合、熱傷の原因となることがあります。

【使用上の注意】

製品の素材に対して使用者が過敏症であることが分かっている場合は、製品を使用しないでください。 打撲、腫脹、凍傷のある部位には、直接皮膚に触れないようにすることをお勧めします。 ウォーミングパッドは磁石に反応し、かつX線に対して非透過性の素材です。MRIやX線撮影する際は、必ずブランケットを外して下さい。 ブランケットから発生する熱により、経皮投薬システム（パッチ）からの薬物送達が増加する可能性がありますのでご注意ください。 再使用をしないでください。製品の性能が低下し、また製品を通じた感染等が生じる可能性があります。

【使用方法】

ブランケットは、有資格の医療従事者またはその監督下で使用することを推奨しております。ブランケットは、周囲温度が18～24℃の環境で使用してください。


1. プレカットタブからパッケージを開封し製品を取り出す。
2. ブランケットを開き、完全に広げます。
3. 毛布が温まるまで約30分待ちます。
4. ブランケットの白い面を使用者側に向けて置きます。また、正しい上面はブランケットの「THIS SIDE UP」マークで示されます。

ブランケットを使用者の顔の上に置かないでください。 ブランケットを使用者の腕、脚、体の下に敷かないでください。 固定ベルト、テープ、ストラップ、補助寝具等をブランケットの上から使用しないでください。 補助寝具、医療器具、その他の体重を支えるものを含め、余計な重量や圧力をブランケットの上に加えて使用しないでください。 ウォームパッドが当たっている部分につきましても、定期的に肌の状態をチェックしてください。 使用する際はブランケットを回転させるかスライドさせることで位置を調整し、ブランケットを折りたたまないでください。 ブランケットの最大使用時間は10時間です。 就寝時には使用せず、乳幼児や身体のご不自由な人など、自分ですぐに使用を中止できない場合は使用しないようお願いします。 本品を直接肌にかけて使用する場合は、低温やけどにご注意ください。

また、自覚症状を伴わないで低温やけどになる場合があるので十分に気を付けて使用して下さい。また周術期の病人に使用する場合は、病人本人がすぐに使用を中止できない場合が想定されるため、医療従事者が低温やけどに十分注意を払いながら使用して下さい。 肌に痛みやかゆみ、また長時間赤みが消えない場合は使用を中止し、医師にご相談ください。 本品のウォーミングパッドが取り付けられている部分を折ったり、重ねたりして使用しないでください。 本製品を使用しながらホットカーペットを利用する時や、ストーブの前にいることで、表示以上の温度になる場合がありますのでご注意ください。 ウォーミングパッドの特質上、酸素濃度が低い場所では温度上昇までに時間がかかる場合があります。 汗等で衣服等が濡れていることで、直接熱が肌に伝わりやすくなり、異常発熱と感じられる場合がありますが、異常発熱することはありませんので、ご安心ください。 設定された温度を妨げる可能性もありますので、水濡れにはご注意ください。 本品を開封する際は、切り込み部分から手で開封してください。刃物等で開封される場合、ウォームパッド部分を切らないようにご注意ください。 ウォーミングパッドの袋を破って内容物を出したり、口に入れたりしないでください。万一保温パッドの内容物が眼に入った場合には、眼を水洗し医師にご相談ください。 その他、身体に異常を感じた場合、暑すぎると感じた場合は使用を中止し、医師にご相談ください。

【保管上の注意と廃棄について】

水濡れ、直射日光、高温多湿をさけて保管してください。 幼児の手の届くところに置かないでください。 使用後は各自治体の区分に従って廃棄してください。

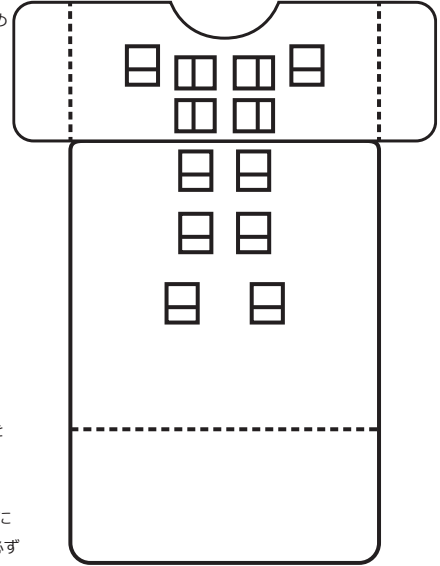

ブランケットは折り重ならないようにご注意ください。



固定ベルト、テープ、ストラップ、補助寝具等をブランケットの上に使用しないでください。



抹消(皮膚を含む)循環に重度の障害がある方は使用しないでください。



使用中は皮膚の状態にご注意ください。



ウォーミングパッドを上に向け、かつブランケットの白い面が使用者側になるよう置きます。正しい上面はブランケットの「THIS SIDE UP」マークで示されます。



【その他】

本製品の品質には万全を期しておりますが、万一事故が発生した場合や不良品がございましたら、発生日、お買い上げの日、場所等を記載の上、輸入販売元または、販売代理店までご連絡ください。

Mölnlycke および BARRIER® EasyWarm® の名称、ロゴは、Mölnlycke ヘルスケアグループの登録商標です。